

의료기기

* 본 제품은 “의료기기”에 해당하므로, 사용 시 주의 사항을 반드시 읽고 사용하십시오.

[사용 시 주의사항]

1. 기기를 사용하기 이전에 사용설명서를 완전히 숙지해야 한다.
2. 핸드피스에 사용에 필요한 bur가 남아 있는지 확인한다.
3. 핸드피스와 함께 사용되는 모든 주변 장비가 완벽하게 갖추어져 있는지 점검한다.
4. 사용 전에 고압증기멸균으로 135°C 3분간 멸균한다.
5. 시술 전에 환자가 시술에 알맞은 상태인지 확인한다.
6. 시술 장소가 문제없는지 확인한다.

[사용 목적]

치아를 절삭하기 위하여 공기압으로 구동하는 핸드피스이다.

[사용방법]

- INTRAmaticHandstück1:1 10E
 - INTRAmatic Handstück 1:1 10ES
 - INTRAmatic Winkelstück 4:1 14E
 - INTRAmatic Winkelstück 4:1 14ES
 - INTRAmatic Winkelstück 1:1 20
 - INTRAmatic Winkelstück 1:1 20ES
1. 핸드피스와 모터가 딸깍하고 달힐 때까지 모터의 연결부에 민다.
 2. 스틸 또는 경화된 금속으로 만들어진 bur만 사용한다.
 - 샤프트 직경 2.334~2.350mm
 3. 시계 반대방향으로 돌려서 bur를 핸드피스에 끼운다.
 4. 원하는 시술을 행한다.
 5. 사용이 끝난 후 bur가 멈추었을 때 시계방향으로 계속 돌려서 bur를 제거하고 나면 grip sleeve는 원래의 위치로 돌아간다.
 - PROPHYwiz 181P
1. 우측으로 돌려서 나사를 꼭 조여 모터와 연결한다.
 2. 핸드피스에 치석제거를 위한 head를 연결한다.

3. 치석제거 시술을 행한다.
4. 사용이 끝난 후 치석제거용 head를 핸드피스에서 벗긴다.

[사용 후 보관 및 관리방법]

1. 보관 방법
 - 1) 외장부분 세척사용 후 연마된 먼지 및 가루를 털어내고 알코올로 닦아 낸다.
 - 2) 외장부분 소독
- 일주일에 한번은 세척하거나 기름을 바른다. 절삭기 제거 후의 핸드피스의 주입구를 Kavo스프레이를 이용하여 뿌린다.



- 3) Kavo 스프레이로 유지 Bur 제거 클린팩으로 커버하고 스프레이의 플라스크 노즐에 놓는다. 2초간 스프레이 플라스크의 버튼을 누른다.
 - 4) 수명 유지
- 자동적이고 효과적인 내부와 외부의 청소를 위해 기기를 청소, 멸균, 유지한다. 매 멸균 전뿐만 아니라 정오와 시술 후 저녁의 하루 두 번 터빈의 정비가 필요하다.
- ※ 적절하지 않은 유지 및 보수는 제품의 수명을 줄이고 기능장애를 가져올 수 있다.
2. 멸균 방법
- 헤드는 135°C의 가압멸균기 안에서 멸균되어야 한다. 각 멸균 사이클 이후에는 접촉으로 인한 멸균 효과 감소를 막기 위해, 즉시 멸균기로부터 터빈을 빼낸다.

[저장방법]

상온, 습기가 많은 곳은 피할 것

[사용기간]

해당사항 없음

[기타 기재사항]

품목명: 공기압축식치과용핸드피스
형명: INTRAmatic handpiece 10 E 외 6건
품목허가번호: 수인 05-1190 호
수입업자상호:
(주)원어스테크놀로지(전화:031-477-9128)
수입업자주소: 경기도 군포시 공단로 298-7, 5층
제조의뢰자: KaVo Dental GmbH (독일,
Bismarckring 39 D-88400 Biberach)
제조사: KaVo Dental GmbH
(독일, Bahnhofstrabe 20, 88447 Warthausen)
제조번호/제조년월일: 제품포장라벨 참조
포장단위: 1PC
작성일자: 2021.05.10

사용설명서

공기압축식치과용핸드피스

(INTRAmatic handpiece 10 E 외 6건)