

## 의료기기

\* 본 제품은 “의료기기”에 해당하므로, 사용 시 주의사항을 반드시 읽고 사용하십시오.

### [사용 시 주의사항]


1. 정해진 용도 이외의 목적으로 사용하지 않는다.
2. 소독된 기구를 사용한다.
3. 사용 전에 연마기가 제대로 작동하는지 확인한다. 연마기를 꼭 잠그지 않으면 치료 중에 빠져 환자나 사용자가 부상을 입을 수 있다.

### [사용 목적]


치아 및 보철물의 연삭 및 연마에 사용되는 재료이다.

### [사용방법]

1. 사용방법

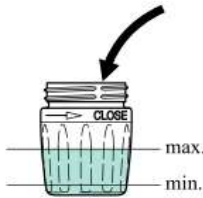


- 1) 파우더 컨테이너의 화살표 반대 방향으로 파우더 컨테이너를 오픈한다.
- 2) 파우더를 채우기 전에, 리필 봉투의 파우더를 잘 흔들어 파우더 컨테이너에 위의 그림과 같이 화살표 방향으로 넣는다.  
(봉투 1개 = 컨테이너 1통)

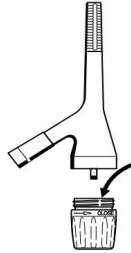

- 3) 파우더 컨테이너의 화살표 방향으로 돌려 잠근다.


※ 파우더 양 조절

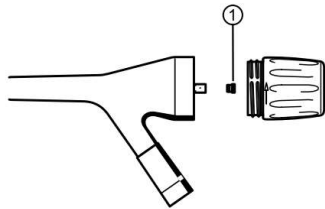

나오는 파우더의 양은 ① P-nozzle을 교체하여 조절할 수 있다.

- P-nozzle G (bronze) = 파우더 양이 많이 나옴.
- P-nozzle K ① = 파우더 양이 적게 나옴.

### 2. 사용 시 주의사항

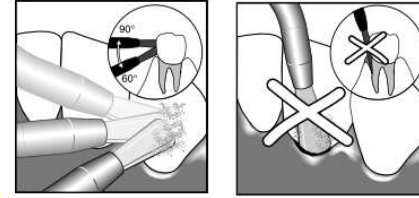

- 1) powder jet 와 치아의 각이 60°~90°가 되어야 한다.
- 2) 핸드피스 팁은 치아 표면으로부터 약 3~5mm 떨어져야 한다.

### [사용 후 보관 및 관리방법]

해당사항 없음

### [저장방법]

상온, 습기가 많은 곳은 피할 것

### [사용기간]

해당사항 없음

### [기타 기재사항]

품목명: 치과용연마제

형명: Neutral 4 bottles 외 10건

품목허가번호: 수신 13-467 호

수입업자상호:

(주)원이스테크놀로지(전화:031-477-9128)

수입업자주소: 경기도 군포시 공단로 298-7, 5층

제조의뢰자: KaVo Dental GmbH (독일, Bismarckring 39 D-88400 Biberach)

제조사: KaVo Dental GmbH

(독일, Bahnhofstrabe 20, 88447 Warthausen)

제조번호/제조년월일: 제품포장라벨 참조

포장단위: 1PC

작성일자: 2021.05.10

# 사용설명서

## 치과용연마제

(Neutral 4 bottles 외 10건)